



ツッコイショシリーズ

特許出願済



ふわふわフィットパンツ

尿とりパッドの安定保持を目的とした、快適な履き心地のホルダーパンツです。

伸縮性と通気性に優れた特殊な編み地が皮膚の圧迫を最小限に抑え、パッドのズレやダレを防止します。

軽度の尿もれでパッドを使用している方、高齢者や重症心身障害児(者)、パウチ装着や腰部変形のある方、また、トイレを使用できない状況下の方にもご使用いただけます。

- 「ゴワゴワしなくて気持ちが良い」
- 「片手でも脱ぎ履きしやすい」
- 「パウチ部の締め付け感がない」
- 「便パウチの漏れが減った」
- 「お腹周りがゆったり快適」
- 「羞恥心が減った」



「ナノフロント®」2倍に増量!!
グリップカさらにUP!!

日本製
MADE IN JAPAN

男女共用
2分丈ボクサー型



品番	nishiura-FF-11	nishiura-FF-12	nishiura-FF-13	nishiura-FF-14	nishiura-FF-17	nishiura-FF-15	nishiura-FF-16	nishiura-FF-18
サイズ	SS	SS	S~M	S~M	S~M	L~LL	L~LL	L~LL
カラー	サックスブルーボーダー	ラベンダーボーダー	サックスブルー	ラベンダー	グレー	サックスブルー	ラベンダー	グレー

※SSサイズのみ、ボーダー柄となります。

SS サイズ

男女 ウエスト
50 ~ 68 cm

大腿部上部 目安
25 ~ 45 cm

S-M サイズ

男性 ウエスト
68 ~ 84 cm


女性 ヒップ
82 ~ 95 cm

L-LL サイズ


男性 ウエスト
84 ~ 104 cm

女性 ヒップ
92 ~ 105 cm


パッド装着
《立位》

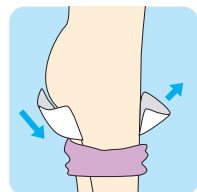

① はじめにパッドを股に差し込みます



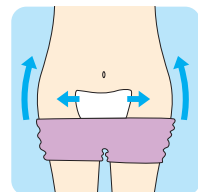


② パッドを広げてパンツを持ち上げます

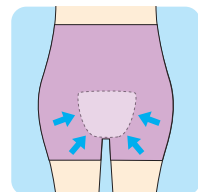

③ パッドを股間部へフィットさせます

パッド装着
《臥床》

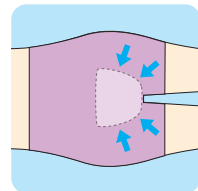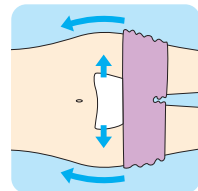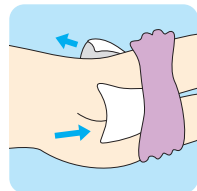

素材：ポリプロピレン 80%
ナイロン 18%
ポリエステル 2%
※塩素系漂白剤、高温タンブラー乾燥は避けてください。

〈共同開発者〉

井上 貴央 鳥取大学名誉教授・医学博士
井上 誠 県立広島大学准教授・保健学博士
株式会社 コーポレーションパールスター

〈お問合せ先〉

※写真と実物の色味が若干異なる場合がございます。

GOOD JOB ニシウラ
www.nishiura.jp



〈販売元〉



株式会社 ニシウラ 〒680-1243 鳥取県鳥取市河原町佐貫 1093-8
TEL : 0858-85-0601 FAX : 0858-85-2227 nobu_nis@nishiura.jp



ツッコイショシリーズ

ふわふわフィットパンツ

ストーマ・パウチ＋尿とりパッドの併用にも
スムーズな着用、やさしい着心地

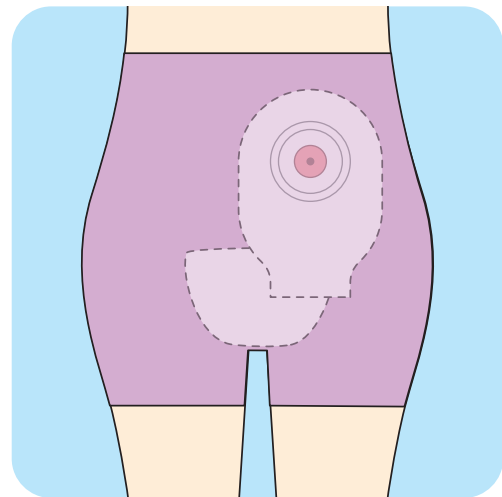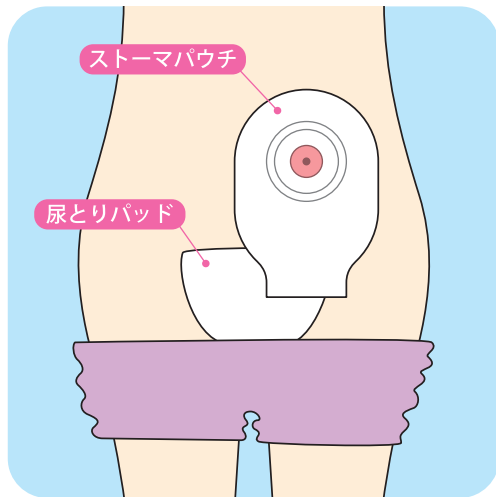

Aさんの感想：

『紙パンツ使用時は、締め付けが強く、パウチからの便漏れもあった。』

しかし、ふわふわフィットパンツを使用するようになってから、
紙パンツに比べてパウチ部の締め付け感が少なく、便漏れも減った。』